

# Biatain® Superabsorber

**fr** Pansement superabsorbant non adhésif pour le traitement des plaies modérément à fortement exsudatives



## Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

23330673 Version 1

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S. Tous droits réservés. © 2024-02-22

## Destination

Le produit est destiné à la cicatrisation en milieu humide et à la gestion des exsudats.

Le produit est destiné à être utilisé par les professionnels de santé et par les patients sous la supervision de professionnels de santé.

## Indications

Ce produit est indiqué pour un large type de plaies, de moyennement à fortement exsudatives chez les patients de 3,5 kg et plus. Cela inclut les plaies aiguës, telles que les brûlures au second degré, les plaies post-opératoires et les plaies traumatiques; ainsi que les plaies chroniques comme les ulcères de jambe, les escarres et les ulcères non infectés du pied diabétique.

## Mises en garde

Ne pas réutiliser ce produit à usage unique, car une contamination croisée pourrait se produire, entraînant potentiellement une infection.

Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et/ou la stérilisation peuvent compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de dommages corporels ou d'infection chez l'utilisateur.

Les plaies infectées, les plaies diabétiques et celles causées exclusivement ou partiellement par une insuffisance artérielle doivent être étroitement surveillées et prises en charge par un professionnel de santé en accord avec les directives de bonnes pratiques locales.

Ne pas couper le produit car cela pourrait entraîner une dégradation de la plaie due aux résidus de produit laissés dans la plaie.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé, car la stérilité du produit peut être compromise, ce qui pourrait potentiellement entraîner une infection.

Le produit n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel. Cependant une contamination rare peut se produire par des quantités infimes de latex de caoutchouc naturel durant la fabrication ou le conditionnement, entraînant potentiellement des réactions allergiques chez les patients présentant des allergies connues ou suspectées au latex de caoutchouc naturel.

Les effets secondaires possibles liés à l'utilisation des pansements peuvent inclure: irritation/inflammation cutanée, réactions allergiques cutanées, macération, douleur, hypergranulation et formation de cloques.

## Informations

Le produit est un pansement superabsorbant stérile à usage unique.

Biatain Superabsorber

- peut rester en place jusqu'à 7 jours, selon la quantité d'exsudat, l'état du pansement et le type de plaie
- peut être utilisé sur les patients traités pour une infection locale ou systémique, à l'appréciation du professionnel de santé
- peut être utilisé en association avec une thérapie par compression
- convient à une utilisation sur une peau fragile en raison de l'absence d'adhésif
- peut être utilisé comme pansement primaire ou secondaire.

Le produit est composé:

- D'une couche supérieure qui offre une barrière perméable et protège contre l'extérieur
- D'une couche contenant des particules superabsorbantes qui permettent une absorption, une rétention et une répartition de l'exsudat dans tout le pansement.
- D'une couche de tissus qui permet un bon maintien de la couche supérieure pour renforcer l'intégrité du produit dans son ensemble.
- D'une couche de transfert qui permet de drainer les fluides vers la couche principale superabsorbante
- D'une couche au contact de la plaie qui permet de drainer rapidement le liquide initial à travers le pansement et qui est dotée de propriétés d'absorption et anti-macération pour une meilleure cicatrisation

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (OE).

Coloplast ne peut être tenu pour responsable des dommages pouvant résulter de l'emploi de ce produit dans des conditions non conformes aux instructions données dans la notice d'utilisation.

## Conditions de stockage

Conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur.

## Utilisation

### Préparation


Nettoyer la plaie et la peau péri-lésionnelle conformément aux directives locales, ex. avec de l'eau tiède ou du sérum physiologique.

Sécher délicatement la peau péri-lésionnelle.


Si un film, une crème, une pommade ou tout autre produit similaire est utilisé, laisser sécher la peau péri-lésionnelle avant d'appliquer le produit.

### Application


Veiller à ce que la manipulation soit aseptique pendant l'application. Choisir une taille de produit qui permette à la couche superabsorbante de dépasser d'environ 1 à 2 cm du bord de la plaie.

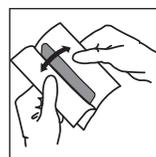

Ouvrir le sachet et sortir le produit du conditionnement. Éviter de toucher la couche au contact de la plaie pendant l'application.

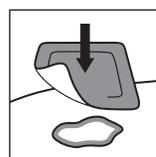

Placer la partie blanche contre la plaie et la partie grise vers l'extérieur.

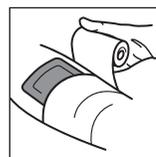

Un pansement secondaire est nécessaire pour la fixation. Ne pas couvrir l'intégralité du produit avec un pansement secondaire occlusif.

### Retrait

Le pansement doit être changé lorsque cela est cliniquement indiqué, lorsque la protection absorbante est saturée d'exsudat ou au bout de sept jours.

Retirer en douceur le pansement secondaire avant de soulever délicatement le produit qui recouvre la plaie. Si le produit est difficile à retirer, il doit être humidifié à l'eau ou au sérum physiologique jusqu'à ce qu'il devienne facile à retirer.

### Élimination

Le produit est destiné à un usage unique exclusivement et doit être éliminé conformément aux directives locales, par ex. avec les déchets ménagers.

Ne pas jeter le produit dans les toilettes.

### Signalement des incidents

Si un incident grave s'est produit au cours de l'utilisation de ce dispositif ou suite à son utilisation, le signaler au fabricant et aux autorités nationales compétentes.

### Explication des symboles



Dispositif médical



Indique que le produit est conforme à la législation européenne en ce qui concerne les dispositifs médicaux



Référence catalogue



Date de péremption (AAAA-MM-JJ)



Numéro de lot



Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)



Fabricant



Consulter la notice d'utilisation



Ne pas réutiliser



Stérilisé à l'oxyde d'éthylène



Emballage unitaire stérile



Ne pas restériliser



Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter la notice d'utilisation



Présente un support qui contient l'identifiant unique du dispositif



Conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur



Emballage recyclable



Capacité d'absorption



Compatible avec l'IRM