

Peristeen® Plus Irrigation Transanale

Check-list d'éligibilité des patients

Ce document est proposé aux professionnels de santé et peut être conservé dans le dossier du patient pour transmission entre le médecin prescripteur et l'infirmier en charge de l'éducation. Il n'est pas destiné à être récupéré par Coloplast.

Partie A (à compléter par le médecin prescripteur)

Nom du patient _____

Date _____

Contre-indications ¹	Oui	Non	Précautions ¹	Oui	Non
Peristeen Plus Irrigation Transanale ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :			Outre le respect des contre-indications, il convient d'être particulièrement prudent si le patient a ou a eu :		
Sténose anale ou colorectale connue			Une maladie anorectale, qui peut entraîner une douleur ou des saignements, p. ex., fissure anale, fistule anale ou hémorroïdes de 3 ^{ème} ou 4 ^{ème} degré ;		
Cancer colorectal			Un fécalome/une constipation sévère. Si le patient est fortement constipé (fécalome), une vidange initiale des intestins est impérative avant de commencer une procédure d'irrigation transanale Peristeen Plus ;		
Maladie intestinale inflammatoire aiguë			Une radiothérapie dans la région abdominale ou pelvienne ;		
Diverticulite aiguë			Une diverticulose sévère ou abcès diverticulaire ;		
Dans les 3 mois suivant une chirurgie anale ou colorectale			Une chirurgie anale ou colorectale antérieure		
Dans les 4 semaines suivant une polypectomie endoscopique			Une chirurgie pelvienne majeure antérieure ;		
Colite ischémique			Une hyperréflexie autonome (HRA) sévère :		
			Un traitement par corticostéroïdes de longue durée ;		
			Une maladie hémorragique ou traitement anticoagulant (à l'exception de l'aspirine ou du clopidogrel) ;		
			Une modification de l'aspect des selles telle que diarrhée soudaine d'origine inconnue. La cause de la diarrhée doit être identifiée ;		
			Un médicament par voie rectale, car l'effet de ce médicament peut être réduit par l'irrigation transanale Peristeen Plus.		
Peristeen Plus Irrigation Transanale n'est pas recommandé pour : ¹					
Les enfants de moins de 3 ans					
Les femmes enceintes, les femmes envisageant une grossesse ou qui allaitent					

Cette liste n'étant pas exhaustive, le médecin/professionnel de santé doit toujours tenir compte des facteurs propres à chaque patient.

- **Toucher rectal effectué ?** (obligatoire pour tous pour éliminer une impaction fécale ou une sténose) Oui Non
Résultats/commentaires : _____
- **Endoscopie ou examen d'imagerie pour éliminer d'éventuelles comorbidités** (obligatoire en cas d'antécédent de chirurgie anale, colorectale ou pelvienne, d'antécédent de radiothérapie et/ou de chirurgie anale, ...) : Oui Non
Résultats : _____
- **Existence d'un fécalome ou d'une stase stercorale importante :** Oui Non
- Si Oui, procéder à une extraction du fécalome ou vidange du colo-sigmoïde avant d'initier les irrigations avec Peristeen Plus
- **Est-ce que le patient a compris les risques éventuels (perforation) et les bénéfices des irrigations transanales avec Peristeen Plus et accepte-t-il de débiter le traitement ?** Oui Non
- **Est-ce que le patient est en mesure de réaliser les irrigations avec Peristeen Plus en toute autonomie ?** Oui Non
- Si Non, est ce que les irrigations seront réalisées par une tierce personne ? Oui Non
- Est-ce que cette tierce personne a été formée à la réalisation des irrigations transanales avec Peristeen Plus ? Oui Non
- **Si antécédent de résection rectale préciser le type d'anastomose :** Colo-anale directe Latéro-terminale Avec poche en J
- **Existence de spécificités à respecter lors de la réalisation des irrigations transanales ?** Oui Non
préciser lesquelles :
- Type de sonde à utiliser : sonde courte sonde standard
- Le prescripteur doit-il être présent à la session d'initiation de Peristeen Plus pour vérifier l'axe d'insertion de la sonde rectale ? Oui Non
- Nombre de pressions maximales pour le gonflage du ballonnet : |____| (Nous recommandons un gonflage minimal du ballonnet Max. 4 pressions pour les sondes standard, max.2 pressions pour les sondes courtes)
- Volume d'eau à instiller : |_____| ml (Ne pas dépasser 1l. Se référer à la notice d'utilisation du produit pour calculer le volume d'eau à instiller.)

Tourner la page pour terminer de compléter la **Partie A**



Je soussigné : _____

Date ____/____/____

Autorise l'initiation de Peristeen Plus

N'autorise pas l'initiation de Peristeen Plus

Si le patient est sélectionné pour débiter les irrigations transanales avec Peristeen Plus, ne pas oublier de planifier les sessions d'éducation et de suivi. La première irrigation doit être réalisée sous la supervision d'un professionnel de santé.

Partie B (à compléter par l'infirmier en charge de l'éducation du patient)

Initiation des irrigations transanales avec Peristeen Plus

- L'infirmier a-t-il été formé à l'utilisation du système d'irrigations transanales Peristeen Plus ? Oui Non
- Si non contacter votre responsable régional Coloplast qui pourra vous assurer une formation.
- Le patient ou la tierce personne réalisant les irrigations transanales a-t-il (elle) reçu des instructions précises de la part d'un professionnel de santé avant d'utiliser ce produit ? Oui Non
- La première irrigation du patient a-t-elle été réalisée sous la supervision d'un infirmier ? Oui Non
- Nom de l'infirmier en charge de l'éducation : _____
- Fonction : IDE IDE stomathérapeute autre, préciser : _____
- Date de la 1^{ère} irrigation : ____/____/____
- Date de la 1^{ère} visite de suivi : ____/____/____
- Est-ce que le patient / la tierce personne réalisant les irrigations transanales est prêt à compléter le carnet de suivi Peristeen Plus Irrigation Transanale ? Oui Non

Information pour votre patient :

S'il ressent pendant ou après l'irrigation transanale Peristeen® Plus, une douleur abdominale ou dorsale sévère ou prolongée, notamment si elle est associée à de la fièvre ou bien un saignement anal sévère ou prolongé, le patient doit consulter immédiatement son médecin ou un service d'urgence (car il peut s'agir d'un cas de perforation).

Avant la première procédure d'irrigation transanale Peristeen® Plus, une analyse minutieuse des antécédents médicaux du patient ainsi qu'un toucher rectal digital doivent être effectués pour identifier toute mise en garde, précaution ou contre-indication potentielle.

Indication

Le système d'irrigation transanale Peristeen® Plus est destiné à instiller de l'eau dans le côlon via une sonde rectale dotée d'un ballonnet gonflable ; la sonde est insérée dans le rectum pour favoriser l'évacuation des selles dans la partie inférieure du côlon de patients qui souffrent d'incontinence fécale, de constipation chronique et/ou devant consacrer un temps anormalement long à la procédure d'exonération.

La sonde rectale à ballonnet est disponible en deux tailles :

- La sonde courte est normalement utilisée par les enfants
- La sonde standard est normalement utilisée par les adultes.

1. Notice d'utilisation de Peristeen® Plus Irrigation Transanale. Juin 2021.

Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie interventionnelle

Laboratoires Coloplast - SAS : Société par actions simplifiée
Siège social : Les Jardins du Golf - 6 rue de Rome - 93561 Rosny sous bois CEDEX - France
Capital social : 22 001 980 Euros - RCS BOBIGNY : 312 328 362 - SIREN : 312 328 362
SIRET : 312 328 362 00040 - CODE NAF (ex APE) : 4646Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 18 312 328 362
Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast - Réf. 2790P - Février 2022 - PS

