

# Peristeen® Irrigation Transanale

## Check-list d'éligibilité des patients

Ce document est proposé aux professionnels de santé et peut être conservé dans le dossier du patient pour transmission entre le médecin prescripteur et l'infirmier en charge de l'éducation. Il n'est pas destiné à être récupéré par Coloplast.

### Partie A (à compléter par le médecin prescripteur)

Nom du patient \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Contre-indications <sup>1</sup>	Oui	Non	Précautions <sup>1</sup>	Oui	Non
<b>Peristeen Irrigation Transanale <u>ne doit pas être utilisé</u> dans les cas suivants :</b>			<b>Outre le respect des contre-indications, il convient d'être particulièrement prudent si le patient a ou a eu :</b>		
Sténose anale ou colorectale connue			Une maladie anorectale, qui peut entraîner une douleur ou des saignements, p. ex., fissure anale, fistule anale ou hémorroïdes de 3 <sup>ème</sup> ou 4 <sup>ème</sup> degré ;		
Cancer colorectal			Un fécalome/une constipation sévère. Si le patient est fortement constipé (fécalome), une vidange initiale des intestins est impérative avant de commencer une procédure d'irrigation transanale Peristeen ;		
Maladie intestinale inflammatoire aiguë			Une radiothérapie dans la région abdominale ou pelvienne ;		
Diverticulite aiguë			Une diverticulose sévère ou abcès diverticulaire ;		
Dans les 3 mois suivant une chirurgie anale ou colorectale			Une chirurgie anale ou colorectale antérieure		
Dans les 4 semaines suivant une polypectomie endoscopique			Une chirurgie pelvienne majeure antérieure ;		
Colite ischémique			Une hyperréflexie autonome (HRA) sévère ;		
			Un traitement par corticostéroïdes de longue durée ;		
			Une maladie hémorragique ou traitement anticoagulant (à l'exception de l'aspirine ou du clopidogrel) ;		
			Une modification de l'aspect des selles telle que diarrhée soudaine d'origine inconnue. La cause de la diarrhée doit être identifiée ;		
			Un médicament par voie rectale, car l'effet de ce médicament peut être réduit par l'irrigation transanale Peristeen.		
<b>Peristeen Irrigation Transanale n'est pas recommandé pour :<sup>1</sup></b>					
Les enfants de moins de 3 ans					
Les femmes enceintes, les femmes envisageant une grossesse ou qui allaitent					

Cette liste n'étant pas exhaustive, le médecin/professionnel de santé doit toujours tenir compte des facteurs propres à chaque patient.

- **Toucher rectal effectué ?** (obligatoire pour tous pour éliminer une impaction fécale ou une sténose)  Oui  Non  
Résultats/commentaires : \_\_\_\_\_
- **Endoscopie ou examen d'imagerie pour éliminer d'éventuelles comorbidités** (obligatoire en cas d'antécédent de chirurgie anale, colorectale ou pelvienne, d'antécédent de radiothérapie et/ou de chirurgie anale, ...) :  Oui  Non  
Résultats : \_\_\_\_\_
- **Existence d'un fécalome ou d'une stase stercorale importante :**  Oui  Non  
- Si Oui, procéder à une extraction du fécalome ou vidange du colo-sigmoïde avant d'initier les irrigations avec Peristeen
- **Est-ce que le patient a compris les risques éventuels (perforation) et les bénéfices des irrigations transanales avec Peristeen et accepte-t-il de débiter le traitement ?**  Oui  Non
- **Est-ce que le patient est en mesure de réaliser les irrigations avec Peristeen en toute autonomie ?**  Oui  Non  
- Si Non, est ce que les irrigations seront réalisées par une tierce personne ?  Oui  Non  
- Est-ce que cette tierce personne a été formée à la réalisation des irrigations transanales avec Peristeen ?  Oui  Non
- **Si antécédent de résection rectale préciser le type d'anastomose :**  Colo-anale directe  Latéro-terminale  Avec poche en J
- **Existence de spécificités à respecter lors de la réalisation des irrigations transanales ?**  Oui  Non  
préciser lesquelles :  
- Type de sonde à utiliser :  sonde courte  sonde standard  
- Le prescripteur doit-il être présent à la session d'initiation de Peristeen pour vérifier l'axe d'insertion de la sonde rectale ?  Oui  Non  
- Nombre de pressions maximales pour le gonflage du ballonnet : | \_\_\_\_ | (Nous recommandons un gonflage minimal du ballonnet)  
- Volume d'eau à instiller : | \_\_\_\_ | | \_\_\_\_ | | \_\_\_\_ | ml (Ne pas dépasser 1l. Se référer à la notice d'utilisation du produit pour calculer le volume d'eau à instiller.)

Tourner la page pour terminer de compléter la **Partie A**



Je soussigné : \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorise l'initiation de Peristeen

N'autorise pas l'initiation de Peristeen

Si le patient est sélectionné pour débiter les irrigations transanales avec Peristeen, ne pas oublier de planifier les sessions d'éducation et de suivi. La première irrigation doit être réalisée sous la supervision d'un professionnel de santé.

## Partie B (à compléter par l'infirmier en charge de l'éducation du patient)

### Initiation des irrigations transanales avec Peristeen

- Le patient ou la tierce personne réalisant les irrigations transanales a-t-il (elle) reçu des instructions précises de la part d'un professionnel de santé avant d'utiliser ce produit ?  Oui  Non
- La première irrigation du patient a-t-elle été réalisée sous la supervision d'un infirmier ?  Oui  Non
- Nom de l'infirmier en charge de l'éducation : \_\_\_\_\_
- Fonction :  IDE  IDE stomathérapeute  autre, préciser : \_\_\_\_\_
- Date de la 1<sup>ère</sup> irrigation : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- Date de la 1<sup>ère</sup> visite de suivi : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- Est-ce que le patient / la tierce personne réalisant les irrigations transanales est prêt à compléter le carnet de suivi Peristeen Irrigation Transanale ?  Oui  Non

Le risque de perforation lié aux irrigations transanales avec Peristeen® reste rare (6/million irrigations)<sup>3</sup>

### Information pour votre patient :

**S'il ressent pendant ou après l'irrigation transanale Peristeen®, une douleur abdominale ou dorsale sévère ou prolongée, notamment si elle est associée à de la fièvre ou bien un saignement anal sévère ou prolongé, le patient doit consulter immédiatement son médecin ou un service d'urgence (car il peut s'agir d'un cas de perforation).**

Avant la première procédure d'irrigation transanale Peristeen®, une analyse minutieuse des antécédents médicaux du patient ainsi qu'un toucher rectal digital doivent être effectués pour identifier toute mise en garde, précaution ou contre-indication potentielle.

### Indication

Le système d'irrigation transanale Peristeen® est destiné à instiller de l'eau dans le côlon via une sonde rectale dotée d'un ballonnet gonflable ; la sonde est insérée dans le rectum pour favoriser l'évacuation des selles dans la partie inférieure du côlon de patients qui souffrent d'incontinence fécale, de constipation chronique et/ou devant consacrer un temps anormalement long à la procédure d'exonération.

La sonde rectale à ballonnet est disponible en deux tailles :

- La sonde courte est normalement utilisée par les enfants
- La sonde standard est normalement utilisée par les adultes.

1. Notice d'utilisation de Peristeen Irrigation Transanale
2. Avis de la Commission Nationale d'Évaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de Santé (CNEDiMTS). Peristeen Irrigation Transanale. Sept 2019.
3. Christensen P, Krogh K, Perrouin-Verbe B, Leder D, Bazzocchi G, Petersen Jakobsen B, Emmanuel AV. Global audit on bowel perforations related to transanal irrigation. Tech Coloproctol. 2016 Feb;20(2):109-15.

Soins des Stomies / Continence / Soins des Plaies / Urologie interventionnelle

pro.coloplast.fr Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.  
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 312 328 362 RCS Bobigny - Réf. 2595P - Mars 2021 - PS

