

# Roue d'aide à l'appareillage

Pour un appareillage adapté à chacun de vos patients stomisés



**Les accessoires Brava®**  
Pour un appareillage adapté à chaque besoin

## Quel produit convient à vos patients ?



Document élaboré avec les membres du Coloplast Ostomy Forum en juin 2018

\* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

◇ Non remboursé Sec. Soc.

Gamme Brava®, Sensura® Mio, soins des stomies : dispositifs médicaux de classe I, non stériles, marqués CE.

Fabricant : Coloplast A/S. Attention, lire attentivement les notices d'instructions avant utilisation.

Document destiné aux professionnels de santé.

Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie interventionnelle

Laboratoires Coloplast - Les Jardins du Golf - 6, rue de Rome  
93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France Tél. 01 56 63 17 00 - Fax : 01 56 63 18 07

pro.coloplast.fr Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.  
© Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 312 328 362 RCS Bobigny - Réf. 2503S - Décembre 2018

 **Coloplast**

# Checklist



**Avant de déterminer ou revoir l'appareillage et/ou les accessoires à prescrire à votre patient, pensez à faire les 4 bilans suivants :**

- Bilan de la stomie : forme, taille, positionnement, morphologie/état de la zone péristomiale
- Bilan du transit : consistance, volume et fréquence des effluents
- Bilan du soin : produits utilisés ? fréquence ?
- Bilan psychologique : implication du patient dans le soin

## Déo-lubrifiant Brava® Pour poches de stomie uniquement

**Bien agiter le flacon ou la dosette avant utilisation.**

1. Ajouter 5-10 ml ou le contenu de la dosette dans la poche.
  2. Frotter doucement la poche pour répartir uniformément le déodorant lubrifiant Brava®.
- Adaptez la quantité en fonction de la taille de votre poche de stomie.  
Si vous utilisez une poche vidable, vous pouvez également ajouter le déo-lubrifiant par le clamp de vidange.  
Répétez l'opération après avoir vidé la poche.

## Anneau protecteur Brava®

- Avant d'appliquer l'anneau protecteur, assurez-vous que la peau autour de la stomie est propre et sèche.
1. Retirer le produit de la boîte, puis ôter les films protecteurs des deux côtés en tirant sur les languettes de retrait.
  2. Modeler le produit sur le pourtour de la stomie. Réajustez la forme si nécessaire. Le produit peut également être appliqué sur le support avant d'appliquer l'ensemble sur la peau. Le produit peut également être appliqué sur la peau. Si vous utilisez un appareillage pour stomie, il est possible d'appliquer l'anneau protecteur directement sur le support du côté du système de couplage autour de la stomie, afin d'obtenir un bon ajustement.
  3. Appliquer l'anneau protecteur sur le pourtour de la stomie. Réajustez la forme si nécessaire. Modeler le produit à l'aide des doigts de façon à ce que le bord de l'anneau protecteur soit bien lisse sur la peau. Le produit peut également être appliqué sur le support avant d'appliquer l'ensemble sur la peau. Si vous utilisez un appareillage pour stomie, il est possible d'appliquer l'anneau protecteur directement sur le support du côté du système de couplage autour de la stomie, afin d'obtenir un bon ajustement.
  4. Positionner l'appareillage comme d'habitude.
- Retrait** - Après utilisation, retirer doucement le support et l'anneau protecteur de la peau. Le produit doit se retirer en même temps que le support. Cependant, s'il y a quelques résidus sur la peau, cela n'altère pas la peau et n'aura pas d'effet sur l'adhésion du prochain produit appliqué.

## CONSEILS D'UTILISATION



Pour plus d'information, lire attentivement les notices d'instructions des produits

### BRAVA®

## Crème de protection Brava®

1. Appliquer une très fine couche de crème sur une peau propre et sèche.
2. Retirer l'excédent de crème avec une compresse avant d'appliquer le protecteur cutané.

## Pâte sans alcool Brava®

- Afin d'éviter toute contamination de la pâte :
- Éviter tout contact entre le tube et la stomie ainsi que tout contact avec l'eau du robinet.
  - Se laver les mains avec du savon et de l'eau avant et après application de la pâte.
  - Nettoyer et sécher la peau autour de la stomie avant d'appliquer la pâte.
- Application** : 3 méthodes possibles
- Application sur le **protecteur cutané** : Appliquer la pâte uniformément directement depuis le tube sur le protecteur cutané à cheval sur le bord interne de la découpe, de façon à former une «cheminée» lors de l'application du protecteur cutané.
  - Application sur le **pourtour péristomal** : Appliquer la pâte uniformément directement depuis le tube sur la peau autour de la stomie.
  - Application **au doigt** : Appliquer la pâte avec le doigt en faisant des «noisettes» autour de la stomie. Le doigt doit être impérativement sec. Veillez à bien changer de doigt pour éviter les fils. Lisser ensuite délicatement les «noisettes» de pâte avec le doigt humidifié ou une compresse pour uniformiser la pâte autour de la stomie.
- Retrait**
- La pâte se retire facilement avec de l'eau tiède et un gant de toilette. Un résidu légèrement gras peut persister sur la peau. Il est préférable de laisser plutôt que d'irriter la peau en voulant retirer tout reste de pâte.

## anneau de protection Brava®

1. Retirer le produit de la boîte, puis ôter les films protecteurs des deux côtés en tirant sur les languettes de retrait.
2. Modeler le produit sur le pourtour de la stomie. Réajustez la forme si nécessaire. Le produit peut également être appliqué sur le support avant d'appliquer l'ensemble sur la peau. Le produit peut également être appliqué sur la peau. Si vous utilisez un appareillage pour stomie, il est possible d'appliquer l'anneau protecteur directement sur le support du côté du système de couplage autour de la stomie, afin d'obtenir un bon ajustement.
3. Appliquer l'anneau protecteur sur le pourtour de la stomie. Réajustez la forme si nécessaire. Modeler le produit à l'aide des doigts de façon à ce que le bord de l'anneau protecteur soit bien lisse sur la peau. Le produit peut également être appliqué sur le support avant d'appliquer l'ensemble sur la peau. Si vous utilisez un appareillage pour stomie, il est possible d'appliquer l'anneau protecteur directement sur le support du côté du système de couplage autour de la stomie, afin d'obtenir un bon ajustement.
4. Positionner l'appareillage comme d'habitude.
5. Après utilisation, retirer doucement le support et l'anneau protecteur de la peau. Le produit doit se retirer en même temps que le support. Cependant, s'il y a quelques résidus sur la peau, cela n'altère pas la peau et n'aura pas d'effet sur l'adhésion du prochain produit appliqué.

## Les soins de la stomie en 6 étapes pour un changement d'appareillage simple :

1. Découper le nouveau protecteur cutané à la taille et à la forme de la stomie +2/3mm.
2. Décoller en douceur du haut vers le bas celui appliqué sur la peau du patient, en maintenant la peau.
3. Examiner l'envers du support (délitement, zone de fuite)
4. Nettoyer doucement à l'eau la stomie et la peau (si besoin utiliser du savon neutre, bien rincer). Sécher la peau en tamponnant délicatement.
5. Appliquer le protecteur cutané et lissez-le en allant de la zone péristomiale vers les bords du protecteur cutané pour assurer un bon contact avec la peau.
6. Vérifier si besoin d'utiliser un joint de pâte ou un anneau pour réaliser une étanchéité péristomiale



## CONSEILS D'UTILISATION

BRAVA®

Pour plus d'information, lire attentivement les notices d'instructions des produits



### Spray de protection cutanée Brava®

1. S'assurer que la peau périlstomiale est propre et sèche.
2. Pulvériser le spray à une distance d'environ 10 cm de la peau.
3. Lorsque la peau périlstomiale est complètement sèche, l'appareillage du produit est nécessaire à chaque changement d'appareillage.

### Poudre Brava®

1. Laver et sécher la peau autour de la stomie.
2. Dévisser le bouchon et orienter le flacon vers la surface souhaitée.
3. Secouer ou presser doucement le flacon et saupoudrer sur la peau.
4. Répartir la poudre de manière homogène à l'aide d'une compresse.
5. Essuyer délicatement l'excédent de poudre avant d'appliquer le protecteur cutané de la poche de stomie.
6. Refermer le bouchon soigneusement après utilisation et conserver le produit dans un endroit frais et sec.

### Brava® Support Plus

1. Ouverture de la boîte. Prendre la languette turquoise et la tirer vers l'arrière pour ouvrir la boîte. Ne pas la déchirer car elle permettra de refermer la boîte.
2. Retirer l'un des deux films protecteurs en recouvrant le bord du protecteur cutané. Il se positionne donc à cheval sur le protecteur cutané et la peau.
3. Placer Brava Support Plus à l'endroit souhaité et lisser Brava Support Plus sur la peau. Mettre un second support Brava Support Plus si nécessaire.
4. Enlever le film protecteur restant et lisser Brava Support Plus où il est nécessaire. Il est conseillé de placer Brava Support Plus où il est nécessaire de renforcer le protecteur cutané.

### Spray de retrait Brava®

1. S'assurer que la peau périlstomiale est propre et sèche.
2. Pulvériser le produit autour des bords de l'adhésif.
3. Après quelques secondes, décoller doucement l'adhésif. Répéter l'opération si nécessaire.


# LA ZONE PÉRISTOMIALE EST PLANE

Orifice de la stomie **au-dessus** de la surface de la peau  
zone lisse ou plus superficiels<sup>1</sup>

Orifice de la stomie **au-dessus** de la surface de la peau  
- avec des plis profonds<sup>2</sup>

Orifice de la stomie **au niveau** de la surface de la peau

Orifice de la stomie **en dessous** de la surface de la peau

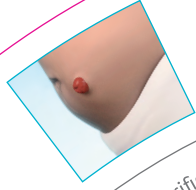

Sensura<sup>®</sup> Mio<sup>\*</sup> support plat

Sensura<sup>®</sup> Mio Convex Fit<sup>3</sup> support plat + anneau  
Semi-convexe 6 mm

Sensura<sup>®</sup> Mio<sup>\*</sup> support plat + anneau

Sensura<sup>®</sup> Mio Convex Fit<sup>\*</sup> Semi-convexe 6 mm

Sensura<sup>®</sup> Mio Convex Fit<sup>\*</sup> Convexe profond 9 mm

Sensura<sup>®</sup> Mio<sup>\*</sup> support plat + anneau

Sensura<sup>®</sup> Mio<sup>\*</sup> support plat

Sensura<sup>®</sup> Mio<sup>\*</sup> support plat + anneau

Sensura<sup>®</sup> Mio Convex Fit<sup>\*</sup> Semi-convexe 6 mm

Sensura<sup>®</sup> Mio Convex Fit<sup>\*</sup> Convexe profond 9 mm

Orifice de la stomie **au-dessus** de la surface de la peau

# LA ZONE PÉRISTOMIALE EST CREUSE

Orifice de la stomie **au niveau** de la surface de la peau

Orifice de la stomie **en dessous** de la surface de la peau





Orifice de la stomie **au-dessus** de la surface de la peau

# LA ZONE PÉRISTOMIALE EST BOMBÉE

Orifice de la stomie **au niveau** de la surface de la peau

Orifice de la stomie **en dessous** de la surface de la peau  
- Abdomen mou

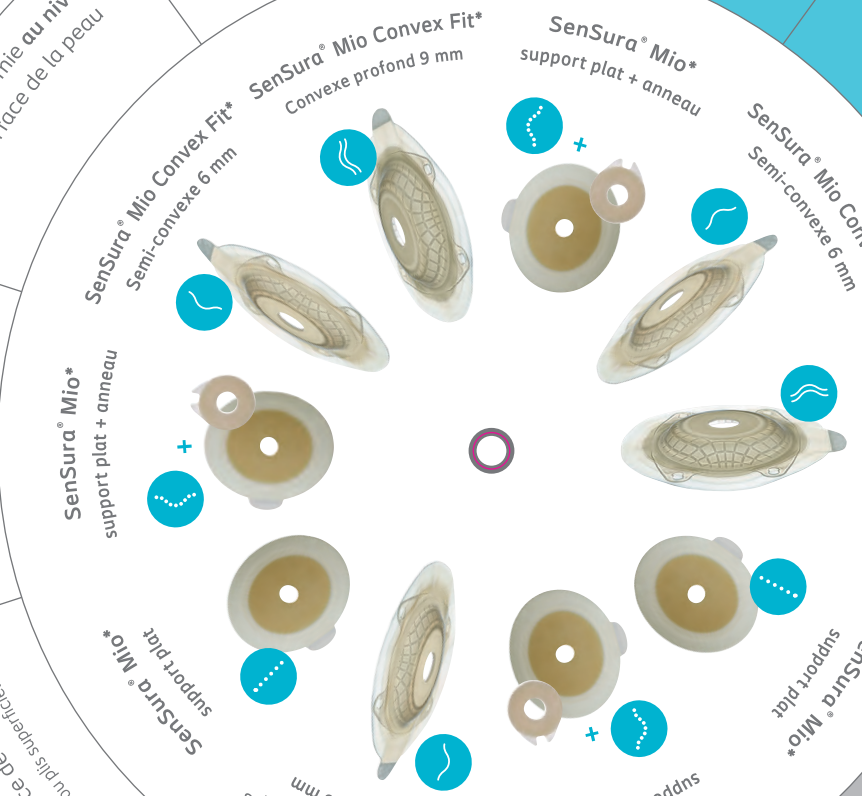

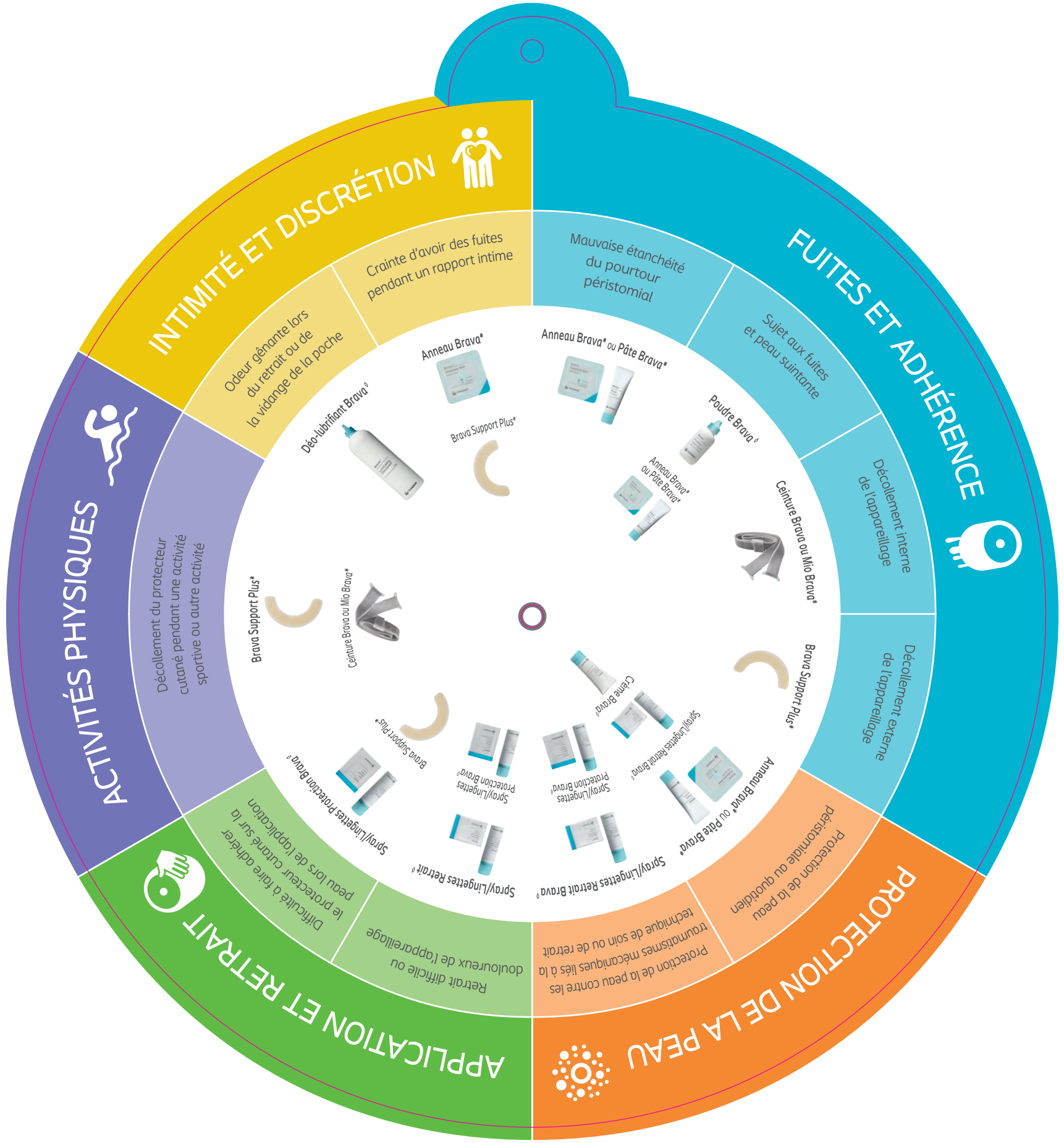

# INTIMITÉ ET DISCRÉTION



Odeur gênante lors du retrait ou de la vidange de la poche

Crainte d'avoir des fuites pendant un rapport intime



# FUITES ET ADHÉRENCE



Mauvaise étanchéité du pourtour péristomial

Sujet aux fuites et peau suintante

Décollement interne de l'appareillage



# ACTIVITÉS PHYSIQUES



Décollement du protecteur cutané pendant une activité sportive ou autre activité



# PROTECTION DE LA PEAU



Protection de la peau péristomiale au quotidien

Protection de la peau contre les traumatismes mécaniques liés à la technique de soin ou de retrait

Décollement externe de l'appareillage



# APPLICATION ET RETRAIT



Retrait difficile ou douloureux de l'appareillage

Difficulté à faire adhérer le protecteur cutané sur la peau lors de l'application

