

Avertissement

Ce produit est à usage unique et doit être jeté après utilisation. La réutilisation de ce produit peut entraîner un risque potentiel pour le patient. Le recyclage, le nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de toxicité ou d'infection pour le patient.

Précautions

L'utilisation du gel **Purilon** chez les patients souffrant d'infection locale et/ou systémique est laissée à la libre appréciation du professionnel de santé. Les plaies diabétiques (surtout dans la partie supérieure de la jambe et au niveau du pied) ainsi que les plaies dues uniquement ou principalement à une insuffisance artérielle doivent être étroitement surveillées par un professionnel de santé en fonction du contexte clinique. En cas de réactions allergiques au produit, merci de contacter les Laboratoires Coloplast.

À usage externe uniquement.

Le gel **Purilon** doit être conservé à température ambiante. Évitez l'exposition directe du produit au soleil.

Le gel **Purilon** est un produit stérile.

Ne pas utiliser le produit si l'emballage est abîmé, et ne pas restériliser.

Coloplast ne peut être tenu pour responsable des dommages pouvant résulter de l'emploi du produit dans des conditions non conformes aux instructions de la notice d'utilisation.

Indications

Le gel **Purilon** est principalement destiné au traitement des plaies nécrotiques et fibrineuses sèches, comme les ulcères de jambe, les escarres et les plaies du pied diabétique non infectées.

Il peut également être utilisé sur les brûlures des 1^{er} et 2nd degrés.

Le gel peut être utilisé durant tout le processus de réparation cutanée afin de maintenir un environnement humide favorable à la cicatrisation des plaies, à l'exception de celles mentionnées à la rubrique précautions.

Description

Purilon est un hydrogel incolore, destiné au traitement des plaies. Il favorise notamment la déterision autolytique des tissus nécrotiques.

Mode d'emploi



Otez l'étiquette du tube accordéon en tirant sur la languette.



Nettoyez la canule en dessous de son extrémité auto-cassable à l'aide d'un antiseptique approprié.



Cassez l'extrémité de la canule.



Appliquez le gel **Purilon** dans la plaie en quantité voulue, en appuyant doucement sur la base du tube accordéon.

Rincez la plaie au sérum physiologique ou à l'eau du robinet. Séchez délicatement le pourtour de la plaie.

Pour une bonne utilisation du gel **Purilon**, suivre ensuite les illustrations ci-dessus.

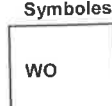

Le gel ne doit pas déborder sur la peau saine. Recouvrir d'un pansement secondaire, type hydrocolloïde, comme Comfeel® Plus.

Pour optimiser la déterision des plaies nécrotiques et fibrineuses, il est recommandé de changer le gel **Purilon** au moins tous les 3 jours en fonction de la quantité d'exsudats.

Le gel **Purilon** favorisant l'élimination des tissus nécrotiques, la taille de la plaie peut sembler s'agrandir pendant les premiers jours d'utilisation; ceci est normal et résulte du ramollissement des tissus nécrosés.

Le gel **Purilon** peut être éliminé en rinçant la plaie au sérum physiologique ou à l'eau du robinet.

Symboles

	Le n° WO indiqué sur la boîte identifie un lot de conditionnement. Le n° de lot qui apparaît sur le tube correspond à un lot de production.
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.